



БИОМЕРА
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

| Обновление программы **STPL**



ООО «Биомера»

115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской,
проезд 2-й Рощинский, д. 8, стр. 3.

+7 495 105 99 01

info@biomera.ru

www.biomera.ru

Отдел продаж

Сервисный центр

Тел.: +7 495 411 99 28

8 800 333 77 14 (бесплатно по России)

Инструкция

- 1) Скопируйте папку, C:\Program Files (x86)\Mera (или папку в которую была установлена программа) и сохраните на рабочем столе – это будет резерв, чтобы не потерять базу данных.
- 2) Удалите программу обычным способом через «Установка и удаление программ».
- 3) Скачайте новую версию программы по ссылке:
http://www.mera-device.com/stplfile/allupdate/1_11_1111/STPL_update_with_1_11_1111.zip
- 4) Разархивируйте скаченный файл. Архив сохраните на любом носителе – это будет резерв программы, если понадобится переустановка.
- 5) Установите программу обычным способом из разархивированного файла.
- 6) Если есть база данных от предыдущей программы, то во время первого запуска программа предложит загрузить базу данных, нажмите «Ок».
- 7) Программа должна полностью загрузиться с существующей базой данных.